
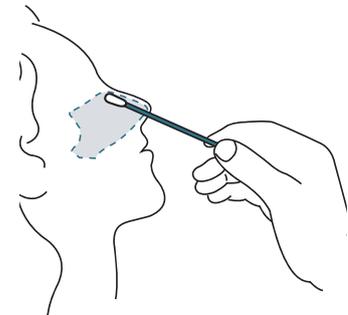


Anleitung NASOCHECKcomfort

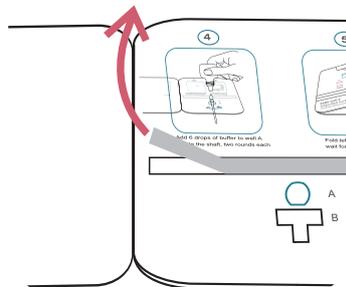

Schritt 1:




- Die Testkarte muss **innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen** des versiegelten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile des Testkits sollten Raumtemperatur haben.

Schritt 2:

- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, gerade Unterlage legen
- Folie über dem Klebestreifen **K** entfernen

Schritt 3:

- Tupfer zuerst **2-3 cm** in die eine Nasenhöhle stecken
- Tupfer **5 Mal** im Kreis drehen
- Dann Vorgang **genauso in der zweiten Nasenhöhle wiederholen**

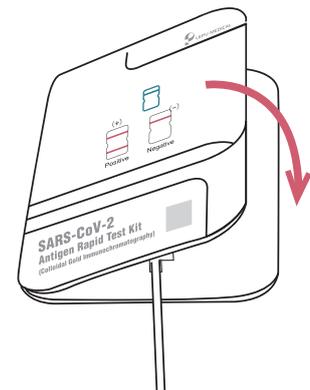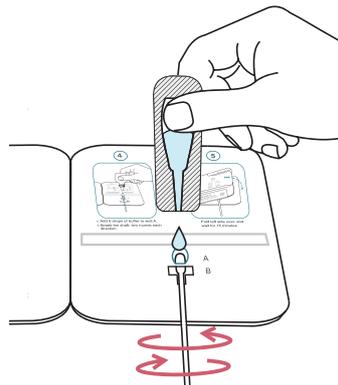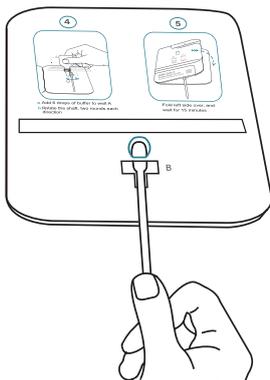

Schritt 4:

- Tupfer am Stiel halten und den Tupferkopf von unten durch die Öffnung **B** in Vertiefung **A** schieben
- Den Tupferkopf dabei nicht berühren



Schritt 5:

- Kopf von Lösungsfläschchen vorsichtig abdrehen und **6 Tropfen der Lösung** auf den Tupferkopf in Vertiefung **A** geben
- Danach Tupfer am Stiel **2 Mal in jede Richtung drehen**

Schritt 5:

- Karte schließen, mit **Klebestreifen K** zusammenkleben & vorsichtig zusammendrücken.
- Ergebnis **nach 15 Minuten** (nicht später als 20 Minuten) auf der Vorderseite der geschlossenen Karte im **Ergebnis-Fenster** ablesen.
- Karte während der Wartezeit nicht mehr bewegen!

Ablese des Ergebnisses

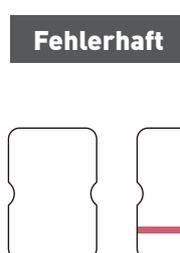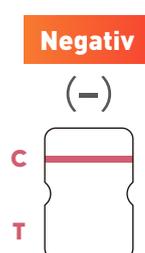

Bitte wiederholen Sie den Test mit einem neuen Test-Kit!

Instruction NASOCHECKcomfort


Step 1:

- The test card should be used within 1 hour after opening the test
- All parts of the test should have room temperature



Step 2:

- Unfold the test card
- Put the test card on a solid, even surface
- Remove the foil from the adhesive strip K

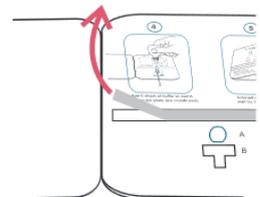


Step 3:

- Insert the swab 2-3 cm into the first nostril
- Rotate the swab 5 times
- Repeat it with the second nostril




Step 4:

- Hold the shaft and insert swab from well B to well A
- Do not touch the head of the swab

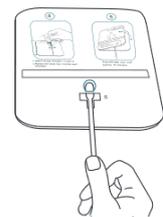

Step 5:

- Remove the head of the puffer phial
- Add 6 drops of buffer to well A
- Rotate the shaft, two rounds each direction

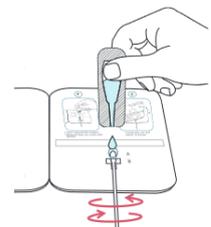

Step 6:

- Fold the left side over
- Close the card and stick it with the adhesive strip K together
- Wait 15 minutes (not longer than 20 minutes)
- Do not move the card during the waiting time
- Read the result:

